



# Oxivir Excel™ Wipe

Széles hatásspektrummal rendelkező tisztító- és fertőtlenítő kendő, nem porózus kemény felületek tisztításához

## Termékleírás

Diversey Care Oxivir Excel Wipe széles hatásspektrummal rendelkezik, egy lépésben tisztít és fertőtlenít, rövid hatá idővel. Az Oxivir Excel Wipe a szabadalmaztatott AHP® technológián alapszik. Alkalmos kemény és nem porózus felületek tisztítására és fertőtlenítésére.

## Legfontosabb tulajdonságok

- Baktericid, fungicid és virucid hatásspektrummal rendelkezik
- Fertőtlenítő hatását már 1 perc alatt kifejti
- Előírás szerű használat esetén nem jelent veszélyt a felhasználóra és kíméletes a felületekhez
- Hatékonyan tisztít
- Illatanyag-mentes
- Aktív hatóanyaga vízre és oxigénre bomlik le
- Nem szükséges leöblíteni

## Előnyök

- Széles hatásspektrummal rendelkezik, mely lehetővé teszi a legmagasabb szintű védelmet a beteg számára. Az európai szabványoknak megfelelően tesztelt. Hatásos több kórokozó ellen. Teljes mértékben virucid, beleértve az alábbiakat: *Poliovirus*, *Adenovirus*, és *Murine*. Hatásos az összes burkolt vírus ellen, mint a HIV, HBV, HCV, *Influenza*, *Vaccinia virus* és *Coronavirus*
- Rövid behatási idejének köszönhetően gyorsan és hatékonyan fertőtlenít
- Kívülről tisztít, valamint vízköldő hatással is rendelkezik, így nincs szükség a fertőtlenítés előtt elő-tisztításra
- A felhasználókra és a felületekre nézve egyaránt biztonságos, a használatra kész oldat nem rendelkezik veszélyre utaló figyelmeztetéssel, nem tartalmaz a légzőszerveket irritáló összetevőket
- AHP tartalma kíméletes a felületekkel, így növelheti a berendezések élettartamát
- Az egészségügyben magas kockázati besorolással rendelkező helyiségekben és felületeken, többek között intenzív osztályok, inkubátorok, betegszobák fertőtlenítésére is alkalmas

## A kendőt átító anyag összetevői

biocid hatóanyag: Hidrogén-peroxid (CAS:7722-84-1) 3,6 g/kg

## Alkalmazás

Töröljük át a fertőtlenítendő felületet a fertőtlenítőszerrel átítot kendővel úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk hatni az előírt behatási ideig.

### Kombinált (tisztító- fertőtlenítő hatású) terméként történő felhasználás:

baktericid és virucid hatásához, behatási idő: 30mp, yeasticid hatásához: 5 perc

### Előzetesen megtisztított felületen:


fungicid hatás: 60 perc

1. Távolítsa el a darabos szennyeződések.
2. Nyissa ki a kendő csomagolását, vegyen ki egy darabot, majd zárja vissza a fedőt.
3. Törölje át a felületeket, győződjön meg róla, hogy az egész felületet megtisztította, majd hagyja megszáradni.
4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a felület a ható idő alatt végig nedves marad.
5. Amennyiben nem nedvesíti be a törlőkendő a felületet, cserélje le.

**Fontos:** Ne keverje össze más vegyszerrel. Ne használja vízre, vagy savra érzékeny felületeken.

A felületnek a behatási idő alatt végig nedvesnek kell maradnia!

\* Fertőtlenítéshez a felület előzetes tisztítása szükséges

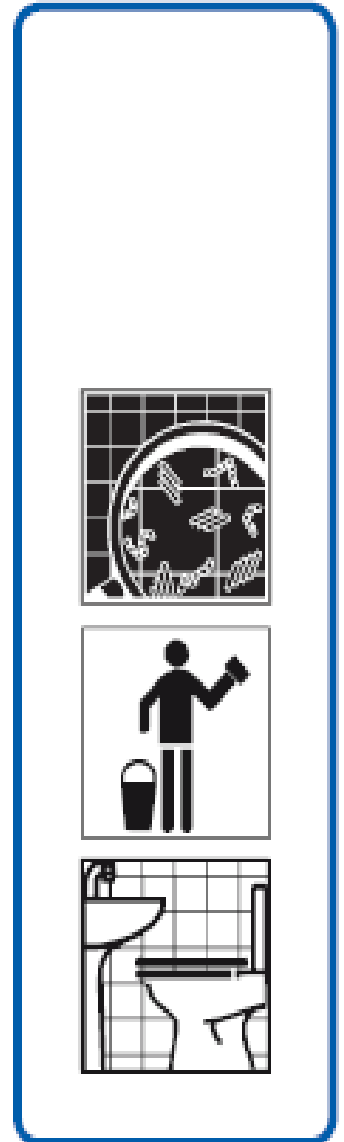

## Technikai adatok

Megjelenés:	polipropilén kendő
Relatív sűrűség (20 °C):	1.000
pH érték oldatban:	1.95
Gyulladáspont:	N/A
Minőségét megőrzi:	720 nap
Szag:	semleges

Ezek az adatok átlagos gyártási értékek, és nem tekinthetők specifikációnak.

## Biztonságos kezelési- és tárolásinformáció

A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes információkat a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó. Oxidálódó felületekkel reakcióba lép.

**Termékkompatibilitás:** A termékismertetőben foglaltak betartása mellett a Oxivir Excel minden általánosan használt eszköz és felület fertőtlenítésére alkalmas.

**Környezeti információ:** A termékben található felületaktív összetevők a 648/2004. EK rendeletben foglaltaknak megfelelően biológiailag lebomlók.

**Mikrobiológiai adatok:** A termék mikrobiológiai hatékonyságát a következő mikrobiológiai tesztek igazolják: EN13727, EN13624, EN14476, EN13704.

**Szennyezés-mentesítés:** A folyadékot megkötő anyaggal itassuk fel.

**Tárolás, eltarthatóság:** Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, jól szellőző helyen, élelmiszerektől elkülönítve gyártástól számított 24 hónapig eltartható.

**Terméktípus:** PT2.

**Gyártja:** Multifill BV, Constructieweg 25a. Mijidrecht, P.O. Box 367, 3640 AJ

**Forgalmazza:** Diversey Kft. 2040 Budaörs, Puskás T u. 6.

**OTH engedélyének száma:** JKF/1027-4/2017.

Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt.